

# Terapia per la Depressione – Guida rapida



Per garantire un uso sicuro ed efficace, leggere il manuale d'uso completo.



## 1. Preparazione della cuffia ComfoCap

Le cuffie sono disponibili nelle taglie: piccola (S), media (M), grande (L).



Posizionare gli elettrodi dentro la cuffia.



Connettere i cavi all'esterno della cuffia rispettando i codici colore.



## 2. Preparazione delle capsule con 0.9% NaCl

Posizionare la capsula dentro l'elettrodo.



Versare 10–15 ml per capsula.



La capsula deve espandersi fino a riempire tutta la cavità dell'elettrodo in 1 minuto.



## 3. Posizionamento della cuffia ComfoCap

Assicurarsi che il cavo **rosso** si trovi sul lato **sinistro**.



Allineare il bordo inferiore della cuffia sopra le sopracciglia.

Allineare la cucitura centrale della cuffia con il naso.

## 4. Inizio del trattamento

Usare **Sooma App** per semplici istruzioni a video.

1. Premere il pulsante per 1 secondo per accendere il dispositivo



2. L'anello mostrerà la disponibilità:



**Bluetooth LED**

- Non connesso
- Connesso

3. Inserire il cavo e premere il pulsante per misurare la qualità del contatto:



**Scarsa → Pronto**

4. Iniziare quando l'anello indicatore diventa **Verde** premendo il pulsante.



la luce **Blu** mostrerà il progresso.

5. Durante il trattamento

6. Concluso il trattamento, il dispositivo si spegne.

## 5. Dopo il trattamento

Gettare le capsule usate. Sciacquare gli elettrodi e asciugarli.



Lavare a mano la cuffia e farla asciugare all'aria.



Caricare il dispositivo utilizzando il caricatore in dotazione.

- Batteria buona
- LED Batteria Batteria
- Batteria bassa
- Caricare ora
- In carica

Scaricare **Sooma App** per avere una facile guida a video, sondaggi, e promemoria per il trattamento.



# Terapia per la Depressione - Manutenzione



support@soomamedical.com

+358 10 328 9811

Sooma Oy Atomitie 5 C, 00370 Finland

## Risoluzione dei problemi

- 1. Parti secche/dure sulla capsula.** Premere delicatamente sulle parti dure con il dito. Se le parti dure non scompaiono, sostituire la capsula con una nuova.
- 2. La capsula cade quando si indossa la cuffia sulla testa.** Assicurarsi che la capsula si sia espansa fino a coprire l'elettrodo prima di mettere la cuffia. Rimuovere la cuffia e reinserire la capsula nell'elettrodo. Se le capsule si rompono, sostituirle.
- 3. Il contatto con l'elettrodo è scarso.** Premere delicatamente la capsula per rilasciare la soluzione salina. Inclinare la testa mentre si preme la capsula per evitare la fuoriuscita di soluzione salina. Se l'anello indicatore rimane completamente arancione e il contatto non migliora quando si preme la capsula, controllare che i collegamenti e i cavi non siano danneggiati.
- 4. La sensazione di stimolazione è intensa.** Premere delicatamente la capsula per rilasciare altra soluzione salina. Sospendere la stimolazione se il disagio persiste.
- 5. Il dispositivo indica che non ci sono trattamenti disponibili.** Collegare il dispositivo all'App Sooma per scaricare automaticamente i trattamenti successivi dalla propria agenda. Se non ci sono trattamenti programmati, contattare il proprio medico.
- 6. La soluzione salina fuoriesce dalle capsule.** Non utilizzare più di 15 ml di soluzione salina per capsula. Utilizzare un panno di carta per asciugare la soluzione salina in eccesso dal tampone. Asciugare le perdite che si verificano durante il trattamento.



**GEA soluzioni**

[info@geasoluzioni.it](mailto:info@geasoluzioni.it)

+39 011 5821948

GEA Soluzioni SRL

Via Spalato 72/A Torino,

10141 Italia

## Controindicazioni

Impianti metallici sopra o all'interno del cranio

Eczema acuto o cute lesa nell'area di stimolazione

## Prima dell'uso

**Ispezionare le condizioni della pelle.** La pelle sotto l'area di stimolazione deve essere sana e pulita. Togliere gli oggetti metallici vicino agli elettrodi prima di iniziare una sessione.

**Le capsule sono monouso.** Il riutilizzo può causare una riduzione della conduttività e la crescita microbica.

**Assicurarsi che il sistema e gli accessori siano puliti, intatti e funzionanti.**

Sostituire l'elettrodo se la superficie è rotta. Sostituire i cavi se sono sfilacciati o se l'isolamento è danneggiato. Il sistema non deve essere utilizzato se si riscontrano segni di danni esterni o di funzionamento improprio.

Il tessuto della cuffia può distendersi dopo ripetuti lavaggi. Sostituire la cuffia e tutti gli accessori dopo 3 mesi di utilizzo quotidiano. **Utilizzare come sostituti solo i componenti e gli accessori indicati come idonei da Sooma.**

## Pulizia dopo l'uso

1. Gettare le capsule usate. È possibile utilizzare il normale cestino dei rifiuti.
2. Pulire tutti i lati del dispositivo e dei cavi con un panno disinfettante. Se necessario, pulire anche la custodia.
3. Sciacquare gli elettrodi con acqua calda corrente e asciugarli con un panno di carta.
4. Lavare a mano la cuffia con acqua calda corrente e farla asciugare all'aria.
5. Lasciare asciugare completamente gli elettrodi e la cuffia prima della sessione successiva.

Una pulizia insufficiente può ridurre la durata del dispositivo e degli accessori riutilizzabili.

**Pulizia tra pazienti.** Lavare a mano o in lavatrice la cuffia con detersivo nel programma per tessuti sintetici a 40°C. Pulire il dispositivo, gli elettrodi, i cavi e la custodia con un panno disinfettante - non usare detersivi.

# Terapia per il Dolore cronico - Guida rapida



Per garantire un uso sicuro ed efficace, leggere il manuale d'uso completo.

Solo per Sooma  
duo




## 1. Preparazione della cuffia ComfoCap

Le cuffie sono disponibili nelle taglie: piccola (S), media (M), grande (L).



Selezionare la polarità della stimolazione

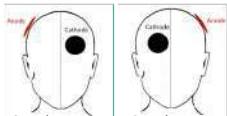

Catodo sull'occhio sinistro in caso di dolore laterale sinistro o per mancini

Catodo sull'occhio destro in caso di dolore al lato destro o per destrorsi

Posizionare gli elettrodi dentro la cuffia.



Connettere i cavi all'esterno della cuffia rispettando i codici colore.



## 2. Preparazione delle capsule con 0.9% NaCl

Posizionare la capsula dentro l'elettrodo.



Versare 10-15 ml per capsula.



La capsula deve espandersi fino a riempire tutta la cavità dell'elettrodo in 1 minuto.



## 3. Posizionamento della cuffia ComfoCap



Allineare il bordo inferiore della cuffia sopra le sopracciglia.

Allineare la cucitura centrale della cuffia con il naso.

## 4. Inizio del trattamento

Usare **Sooma App** per semplici istruzioni a video.

1. Premere il pulsante per 1 secondo per accendere il dispositivo



2. L'anello mostrerà la disponibilità:




**Bluetooth LED**

- Non connesso
- Connesso

3. Inserire il cavo e premere il pulsante per misurare la qualità del contatto:



4. Iniziare quando l'anello indicatore diventa **Verde** premendo il pulsante.

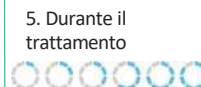

la luce **Blu** mostrerà il progresso.

5. Durante il trattamento

6. Concluso il trattamento, il dispositivo si spegne.

## 5. Dopo il trattamento

Gettare le capsule usate. Sciacquare gli elettrodi e asciugarli.




Lavare a mano la cuffia e farla asciugare all'aria.



Caricare il dispositivo utilizzando il caricatore in dotazione.

- Batteria buona
- LED Batteria Batteria bassa
- Caricare ora
- In carica

Scaricare **Sooma App** per avere una facile guida a video, sondaggi, e promemoria per il trattamento.

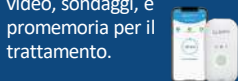

# Terapia per il Dolore cronico - Manutenzione



support@soomamedical.com

+358 10 328 9811

Sooma Oy Atomitie 5 C, 00370 Finland

## Risoluzione dei problemi

- 1. Parti secche/dure sulla capsula.** Premere delicatamente sulle parti dure con il dito. Se le parti dure non scompaiono, sostituire la capsula con una nuova.
- 2. La capsula cade quando si indossa la cuffia sulla testa.** Assicurarsi che la capsula si sia espansa fino a coprire l'elettrodo prima di mettere la cuffia. Rimuovere la cuffia e reinserire la capsula nell'elettrodo. Se le capsule si rompono, sostituirle.
- 3. Il contatto con l'elettrodo è scarso.** Premere delicatamente la capsula per rilasciare la soluzione salina. Inclinare la testa mentre si preme la capsula per evitare la fuoriuscita di soluzione salina. Se l'anello indicatore rimane completamente arancione e il contatto non migliora quando si preme la capsula, controllare che i collegamenti e i cavi non siano danneggiati.
- 4. La sensazione di stimolazione è intensa.** Premere delicatamente la capsula per rilasciare altra soluzione salina. Sospendere la stimolazione se il disagio persiste.
- 5. Il dispositivo indica che non ci sono trattamenti disponibili.** Collegare il dispositivo all'App Sooma per scaricare automaticamente i trattamenti successivi dalla propria agenda. Se non ci sono trattamenti programmati, contattare il proprio medico.
- 6. La soluzione salina fuoriesce dalle capsule.** Non utilizzare più di 15 ml di soluzione salina per capsula. Utilizzare un panno di carta per asciugare la soluzione salina in eccesso dal tampone. Asciugare le perdite che si verificano durante il trattamento.



[info@geasoluzioni.it](mailto:info@geasoluzioni.it)

+39 011 5821948

GEA Soluzioni SRL

Via Spalato 72/A Torino,

10141 Italia

## Controindicazioni

Impianti metallici sopra o all'interno del cranio

Eczema acuto o cute lesa nell'area di stimolazione

## Prima dell'uso

**Ispezionare le condizioni della pelle.** La pelle sotto l'area di stimolazione deve essere sana e pulita. Togliere gli oggetti metallici vicino agli elettrodi prima di iniziare una sessione.

**Le capsule sono monouso.** Il riutilizzo può causare una riduzione della conduttività e la crescita microbica.

**Assicurarsi che il sistema e gli accessori siano puliti, intatti e funzionanti.**

Sostituire l'elettrodo se la superficie è rotta. Sostituire i cavi se sono sfilacciati o se l'isolamento è danneggiato. Il sistema non deve essere utilizzato se si riscontrano segni di danni esterni o di funzionamento improprio.

Il tessuto della cuffia può distendersi dopo ripetuti lavaggi. Sostituire la cuffia e tutti gli accessori dopo 3 mesi di utilizzo quotidiano. **Utilizzare come sostituti solo i componenti e gli accessori indicati come idonei da Sooma.**

## Pulizia dopo l'uso

1. Gettare le capsule usate. È possibile utilizzare il normale cestino dei rifiuti.
2. Pulire tutti i lati del dispositivo e dei cavi con un panno disinfettante. Se necessario, pulire anche la custodia.
3. Sciacquare gli elettrodi con acqua calda corrente e asciugarli con un panno di carta.
4. Lavare a mano la cuffia con acqua calda corrente e farla asciugare all'aria.
5. Lasciare asciugare completamente gli elettrodi e la cuffia prima della sessione successiva.

Una pulizia insufficiente può ridurre la durata del dispositivo e degli accessori riutilizzabili.

**Pulizia tra pazienti.** Lavare a mano o in lavatrice la cuffia con detersivo nel programma per tessuti sintetici a 40°C. Pulire il dispositivo, gli elettrodi, i cavi e la custodia con un panno disinfettante - non usare detersivi.

